



BLUONE



Mobiler Schwimmbadlift

Was ist BLUONE?

BLUONE ist eine Vorrichtung, die den Zugang für Personen mit begrenzten motorischen Fähigkeiten zu fast allen Wasserbeckentypen ermöglicht.

Außergewöhnlich praktisch und sicher, Batteriebetrieben (Wiederaufladbare Akku) und mit fünf verschiedenen Sicherheitsstufen, bedarf das Gerät keiner Wartung. Es reicht aus wenn Sie den Akku, immer wenn dies von den Indikatoren angezeigt wird, wiederaufladen.

Wie funktioniert BLUONE?

Die zu hebende Person setzt sich in den Stuhl, (die Armlehnen lassen sich hochklappen) danach fährt man an den Schwimmbadrand und fixiert die Bremse, jetzt müssen Sie nur noch den Knopf zum absenken drücken und die zu hebende Person wird sanft ins Wasser abgesenkt. Auf Wunsch kann der Sitz mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet werden.

Sicherheitseinrichtungen:

- 1) Standbremse – ohne aktivierte Bremse kann der Kraftarm nicht bedient werden!
- 2) Not-Stopp-Schalter
- 3) Stützfüße – Während sich der Sitz ins Wasser absenkt werden die Stützfüße automatisch abgesenkt um ein kippen zu vermeiden.
- 4) Not- Handpumpe – Sollte der Akku mal leer sein, kann die Vorrichtung manuell bedient werden.
- 5) Zwischen den Vorder- und Hinterrädern sind zusätzlich 2 Gummistoßdämpfer vorgesehen die ein umkippen der Vorrichtung verhindert, sollten Sie sich zuviel mit den vorderen Rädern dem Beckenrand nähern.



Technische Daten:

Max. Belastung: 110 KG.
Eigengewicht 65 Kg.
Stromversorgung: 24V
Leistungsstarke Akkus: Bis zu 10Std.
Betriebsdauer
Max. Reichweite 120 cm.
Struktur aus behandeltem gefärbtem Stahl.
Elektro- Hydraulische Einheit.
Akku Ladegerät.
Akkustandanzeige.

Das Gerät ist in der EU zugelassen.

Vorteile von BLUONE:

- Das Hebesystem ist mobil.
- Es braucht keine speziellen Vorrichtungen die an dem Beckenrand anzubringen sind.
- Kompaktes Gerät. Länge 1.20 M, Breite 0.50 M, Höhe 1.25 M
- Sehr Manövrierfähig durch sein leichtes Gewicht (65 Kg)
- Sehr leicht zu bedienen durch das Drücken von nur 2 Knöpfen (auf und ab) die nur bei aktivierter Standbremse funktionieren.
- Optisch schön und zugänglich für motorisch begrenzte Personen.
- Aufbewahrung eines größeren hygienischen Standards am Beckenrand.
- Keine Sondereinrichtungen am Becken die anderen Badegäste stören.
- Ideal für Schwimmhallen mit mehreren Wasserbecken. Durch seine Tragbarkeit kann das Gerät so an mehreren Orten eingesetzt werden.



Vertriebspartner für A. u. D.