

beka 
hospitec



AVERO Classic

Die klassisch elegante Pflegebadewanne

AVERO Classic

bietet Sicherheit und Komfort ...





Klassisch elegantes Design für Ihr Pflegebad ...

Die Besonderheit der AVERO Classic Wanne liegt in einem zeitlosen Design, welches sich in einer klaren, schlichten, äußeren Verkleidung und einem sehr schönen Wanneninnekörper in Körperform widerspiegelt. Der ergonomische Wanneninnekörper bietet dem Bewohner im Schulterbereich ausreichend Platz und gewährleistet den Einsatz geeigneter Sitz- und Badelifter. Die AVERO Classic Hubbadewanne ist frei unterfahrbar, so dass auch auf engstem Raum ohne Probleme mit Badeliftern gearbeitet werden kann. Armauflagen mit hochwertigen verchromten Messinghaltegriffen, im Wannenrand eingelassene Führungen für die Fußstütze sowie ein Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf sorgen für höchsten Komfort und höchste Sicherheit während des Badens. Die Bedienung der Wanne erfolgt über eine Folientastatur mit Symbolen.



AVERO Classic

Wanneninnenkörper in Körperform ...






Vorteile für Ihre Pflegekraft und Bewohner ...

- ❑ Einfache Bedienung über Bedienfolie
- ❑ Häusliche Optik
- ❑ Sicherheitsmodule verhindern Fehlbedienung
- ❑ Porenfreie Oberfläche für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- ❑ Ergonomisches Arbeiten durch Höhenverstellung der Wanne
- ❑ Ergonomischer Wanninnenkörper ermöglicht bequemes und sicheres Baden des Bewohners
- ❑ Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
- ❑ Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf
- ❑ Große Schulterfreiheit für den Bewohner
- ❑ Für alle üblichen Lifter geeignet



Optionen AVERO Classic

Wellness und Therapie ...

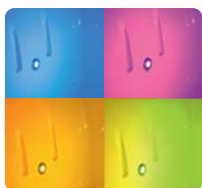

Farblichttherapiesystem ...

Mit zwei seitlich im Wannenkörper eingebauten LED-Spots kann das Badewasser, ohne Wärmeabstrahlung und störenden Blendeffekt für den Bewohner, in das gesamte Farbspektrum getaucht werden. Das Farblichttherapiesystem verfügt über eine frei wählbare Farbauswahl sowie ein automatisches Ablaufprogramm für Farbverläufe.



Luftperlbad ...

Das Luftperlbad mit seiner reinigenden und belebenden Wirkung bietet eine angenehme Massagewirkung und wirkt besonders wohltuend auf den Bewohner. Eine Verkeimung der integrierten Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich, somit ist der Einsatz einer integrierten Desinfektionsanlage zur Desinfektion des Luftperlbades nicht notwendig.



Musiksoundsystem ...

Durch zwei im Oberkörperbereich integrierte Schalldruckschwinger werden die Schwingungen der Musik direkt ins Wasser und auf den Körper des Bewohners übertragen. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von individuellen Musikdateien nach Ihren Wünschen.



Aromatherapiesystem ...

Ein im Wannenkörper integriertes Aromatherapiesystem ermöglicht die Anwendung von verschiedenen Aromen die, zusammen mit der angewärmten Luft durch das Luftperlbadsystem und dem Badewasser, für den Bewohner ein wunderschönes Sinneserlebnis entfalten. Diese Option ist nur in Verbindung mit dem Luftperlbadsystem möglich.



Automatische Wannenfüllung ...

Genießen sie die Möglichkeit durch einen automatischen Wannenfüllstopp die Wanne zu befüllen, um sich während der Befüllung der Wanne ganz dem Bewohner zu widmen. Die Füllhöhe ist frei wählbar und wird einmalig festgelegt. Sie können jederzeit nach dem Füllstopp durch Drücken der Taste die Wanne weiter befüllen.



Desinfektionseinrichtung ...

Die eingebaute Desinfektion bietet maximalen Schutz gegen Kreuzinfektionen und erlaubt die Verwendung geeigneter, zugelassener, hauseigener Flächendesinfektionsmittelkonzentrate. Die Desinfektionsbrause und der Behälter sind zusätzlich gegen Fehlbedienung gesichert.

Technische Daten AVERO Classic

Gesamtmaß , inklusive Bedienpult	2.025 mm x 805 mm
Wanneninnenkörper (L x B)	1.700 mm x 540/665 mm
Hubhöhe	695 - 1.095 mm
Max. Patientengewicht	200 kg
SWL	320 kg
Stromanschluss	230 Volt

Zubehör / Optionen

Automatischer Wasserstopp
Wannenverkürzer
Desinfektionseinrichtung
Luftperlbad
Farblicht-Therapiesystem
Musik-Soundsystem
Aroma-Therapiesystem
Sonderfarbe nach RAL

