

125 JAHRE

ERFAHREN
MENSCHLICH
LÖSUNGS-
ORIENTIERT

STIEGELMEYER
GROUP

Dali-Serie



Die Betten für eine neue
Lebensqualität in der häuslichen Pflege

Dali – die Bettenserie für die Zukunft der Pflege

Die häusliche Pflege ist das Fundament der Pflege in unserer Gesellschaft. Deshalb spielt die technische Weiterentwicklung der Pflegehilfsmittel eine entscheidende Rolle. Ihre immer leichtere Bedienbarkeit und die Vernetzung durch digitale Assistenzsysteme können Belastungen mildern, die durch den Pflegekräftemangel und die soziale Isolation vieler alter Menschen entstehen.

Unsere Dali-Bettenserie prägt die häusliche Pflege in Deutschland und Europa seit Jahren. Jetzt stellen wir die Weichen in die Zukunft. Mit digitaler Steuerung und dem praktischen Montagesystem Easy Click entlasten unsere Dali-Modelle die Mitarbeiter des Sanitätshauses ebenso wie die Pflegenden zuhause oder in Heimen.

Mit Dali-Betten von Burmeier genießen Bewohner und Pflegenden viel Komfort, können in der vertrauten häuslichen Umgebung leben und sich rundum sicher fühlen. Der Fachhandel profitiert von schnellem Aufbau, optimaler Hygiene durch eine validierte maschinelle Aufbereitung und der digitalen Vernetzung.

Der Name Dali steht jetzt und in Zukunft für Betten, denen die Menschen vertrauen.

Dali



- **Höhenverstellung:** 40 – 80 cm
- **Wirtschaftlich, wohnlich und sicher:**
 - sekundenschnelle Montage der Seitensicherungen mit Easy Click
 - kabelloser oder kabelgebundener Handschalter
 - wohnliche Holzhauben optional

Seite 4

Dali 100



- **Höhenverstellung:** 40 – 80 cm
- **Mehr Komfort in der Pflege zuhause:**
 - 100 cm breite Liegefläche gibt dem Bewohner mehr Freiraum
 - Sanitätsfachhandel kann Vertragsvorgaben und Kundenwünsche erfüllen
 - kabelgebundener Handschalter

Seite 4

Dali wash



- **Höhenverstellung:** 40 – 80 cm
- **Maschinell waschbar für ideale Hygiene:**
 - KTL-Beschichtung schützt vor Korrosion
 - Schutz und Entlastung für Sanitätshauspersonal und die häusliche Pflege
 - Reduzierung der Prozesskosten durch Automatisierung und schnellen Wiedereinsatz

Seite 6

Dali low-entry



- **Höhenverstellung:** 23 – 63 cm
- **Niedrigbett zur Sturzprophylaxe:**
 - niedrige Einstiegs- und Liegehöhe von nur 23 cm schützt vor Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen
 - Seitensicherungen mit Easy Click
 - kabelgebundener Handschalter

Seite 8

Inhalt

2 Modellvarianten

4 Dali

6 Dali wash

8 Dali low-entry

10 Easy-Click-System

12 Kabelloser Handschalter

14 24-Volt-Antriebssystem

15 Softcover


16 Matratzen

17 Praktisches Zubehör

21 Ausstattung und Optionen

22 Der Weg zum Pflegebett

23 Die Stieglmeyer-Gruppe

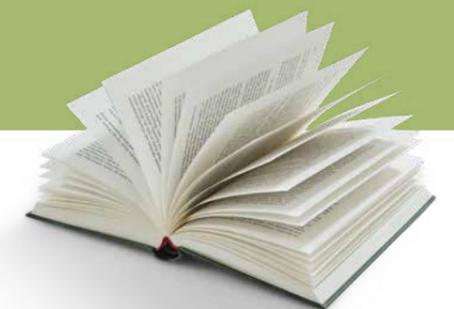

Liegeflächen-
breite:
90 cm
100 cm



Dali

Schnell und digital

Das Dali verdankt seinen Erfolg als Deutschlands meistverkauftes Pflegebett seiner zukunftsweisenden Technik und Langlebigkeit. Es ist ein robustes und wartungsarmes Bett, hergestellt aus hochwertigen Materialien.


Die 4-geteilte Liegefläche lässt sich bequem mit einem **kabellosen Handschalter** bedienen, der sich per Bluetooth mit dem Bett vernetzt. Dabei ist dank der Fußtieflage standardmäßig eine gesundheitsfördernde **Sitzposition** zum Essen oder Fernsehen möglich. Möchte der Pflegenden bestimmte Positionen für den Bewohner sperren, kann er dies mithilfe des Handschalters mühelos erledigen. Auf Wunsch kann das Dali mit einer Umfeldsteuerung, zum Beispiel einer Sprach- oder Augensteuerung, ausgestattet werden.

Die durchgehende Seitensicherung rastet mit dem **Easy-Click-System** einfach an vormontierten Halterungen ein. Dadurch wird der Aufbau des Bettes erheblich leichter.

Starke Vorteile

- sichere Arbeitslast von 185 kg
- Bremstritte mit angenehmer Haptik, auch in Hausschuhen oder Socken bedienbar
- kabelloser Handschalter mit sehr langem Einsatzzyklus, geringerer Serviceaufwand für alle Bediener des Bettes
- kabelgebundener Handschalter wählbar
- einfacher und schneller Aufbau durch das Easy-Click-System
- Unterschenkellehne bei allen Dali-Modellen mit optionalem Rastmaten anstellbar
- Modellvariante Dali 100 mit 100 cm breiter Liegefläche und kabelgebundenem Handschalter
- optionale Einrichtung einer Umfeldsteuerung, z. B. über Sprachbefehle oder Augenbewegungen

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

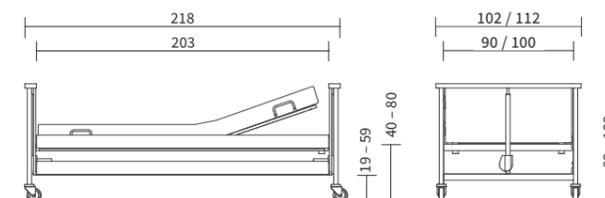

Produktbesonderheiten:



▲ Mit dem kabellosen Handschalter können Bewohner und Pflegenden das Bett mühelos bedienen.

▲ Die bequeme Sitzposition erleichtert die Atmung und senkt das Aspirationsrisiko bei Mahlzeiten.

▼ Die Bremsen lassen sich auch mit Hausschuhen angenehm bedienen.

▼ Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit Easy Click werkzeuglos anbringen und abnehmen.



▲ Auf Wunsch lässt sich am Dali eine Umfeldsteuerung mitsamt Halterung installieren.



Eine sichere Hygiene und der Kampf gegen multiresistente Keime stehen auch in der Pflege zuhause immer mehr im Mittelpunkt. Maschinenwaschbare Betten bieten hier starke Vorteile. Sie gewährleisten eine **ideale Reinigung und Desinfektion** durch validierbare Prozesse. Gleichzeitig sparen sie dem Betreiber Zeit und Kosten, da die aufwendige und kräftezehrende manuelle Aufbereitung durch die Mitarbeiter des Sanitätshauses entfällt. Das Bett ist schneller wieder einsatzbereit und vermeidet dadurch unnötige Standzeiten.

Das Dali wash wurde für die Reinigung in Waschanlagen konzipiert. Durch seinen hohen **Schutzgrad IPX6** kann das Bett ohne Demontage des Antriebssystems aufbereitet werden. Die **KTL-Beschichtung** von außen und innen schützt gegen Korrosion. KTL steht für „kathodische Tauchlackierung“, ein elektrochemisches Lackierverfahren für höchste Beständigkeit. Bohrungen sorgen dafür, dass Restflüssigkeit nach dem Waschvorgang vollständig abfließen kann.

Starke Vorteile


- sichere Arbeitslast 185 kg
- durchgehende Seitensicherung mit Easy-Click-System
- kabelloser Handschalter
- Fußtieflage inklusive

Besonders hoher Hygienestandard

Dali wash

Das Bett für eine optimale Hygiene

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

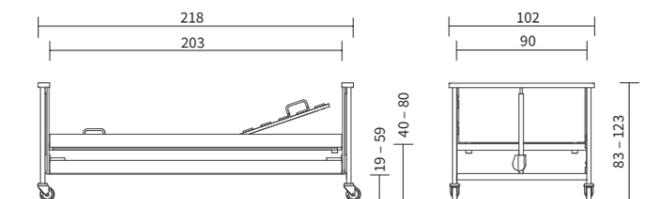

Produktbesonderheiten:



▲ Die KTL-Beschichtung schützt das Bett innen und außen vor Korrosion.

▲ Bohrungen in den Metallprofilen lassen Restflüssigkeit abfließen.

▲ Kunststoff-Stopfen mit Bohrungen ermöglichen den Austritt von Restfeuchtigkeit.

▲ Versiegelte Oberflächen eignen sich ideal für eine sichere, gründliche Reinigung.

▲ Die 4-geteilte Liegefläche besitzt hygienische Metallstreben.



Einstiegshöhe
von nur 23 cm
zur Sturz-
prophylaxe




Dali low-entry

Das Niedrigbett


Die niedrige Höhe reduziert das Risiko ▶
von Sturzverletzungen.

Seitensicherungen schützen vor Stürzen – doch wenn sie permanent hochgezogen werden, kann diese freiheitsentziehende Maßnahme die Lebensqualität des Pflegebedürftigen senken. Eine hervorragende Alternative sind **Niedrigbetten** wie das Dali low-entry. Mit seinem Höhenverstellbereich von **23 bis 63 cm** befindet es sich in der tiefsten Position dicht über dem Fußboden. Aus dieser niedrigen Höhe ist das Verletzungsrisiko des Bewohners im Fall eines Sturzes viel geringer. Das erleichtert die Entscheidung, auf Seitensicherungen zu verzichten. So folgt Burmeier der Philosophie des **Werdenfeller Weges**, die Mobilität des Bewohners zu erhalten.

Darüber hinaus profitiert das Dali low-entry von den Vorteilen der Dali-Familie wie der serienmäßigen Fußtieflage und einem kabelgebundenen Handschalter mit selektiver Sperrung.

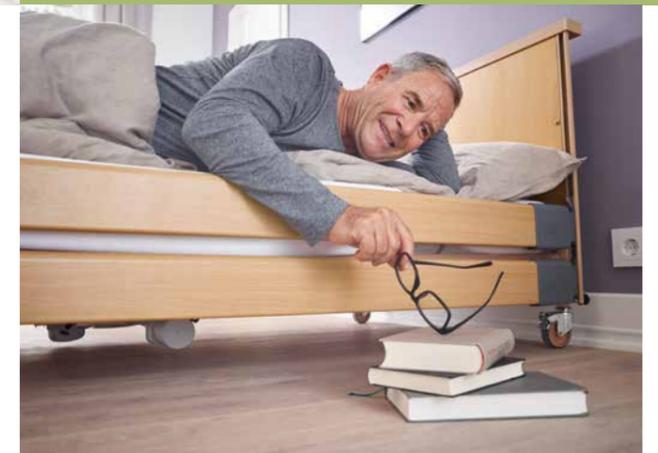

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

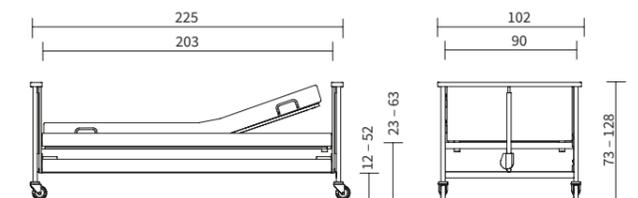

Starke Vorteile

- sichere Arbeitslast 175 kg
- stufenlose Höhenverstellung für ergonomisch angenehmen Ein- und Ausstieg
- 24-Volt-System – keine Ableitstrommessung über die zu erwartende Nutzungsdauer hinaus

Produktbesonderheiten:



Dali low-entry
Hilfsmittel-Nr.
19.40.01.5001
Pflege-Hilfsmittel-Nr.
50.45.01.5003



Das Easy-Click-System

- ▲ Mit Easy Click lassen sich die Holme der Seitensicherung sekundenschnell anbringen und wieder abnehmen.

Die durchgehende Seitensicherung der Dali-Serie ist leicht zu bedienen und bietet viel Schutz. Jetzt ist auch ihre Montage noch viel einfacher geworden. Mit dem Easy-Click-System lassen sich die 4 Holme **sekundenschnell anbringen** oder wieder abnehmen. Zugleich sind sie so sicher und stabil befestigt, dass selbst unruhige Pflegebedürftige jederzeit geschützt sind und die Seitensicherung nicht unbeabsichtigt entfernen können.

In den Kopf- und Fußteilen aller Dali-Betten sind bereits Halterungen vormontiert. Die Holme der Seitensicherung werden einfach daran „festgeklickt“ und rasten sicher ein. Möchte man sie wieder abnehmen, drückt man auf kleine **Entriegelungsschalter** in den Halterungen. Diese Knöpfe sind so angebracht, dass der Bewohner die Seitensicherung nicht versehentlich abnehmen kann. Die Stirnseiten der Holme sind durch elegante anthrazitfarbene Kunststoffkappen geschützt.

Das Easy-Click-System erleichtert Sanitätshausmitarbeitern, pflegenden Angehörigen oder Pflegeheimtechnikern die Montage der Betten erheblich und **spart viel Zeit**. Zugleich kann der Pflegenden die Seitensicherung abnehmen, wenn der Bewohner sie nicht benötigt. Eine praktische Tasche für Transport und Lagerung der Holme ist als Zubehör erhältlich.



- ▲ Die durchgehende Seitensicherung bietet optimalen Schutz.

Leicht montiert



- ▲ Der Aufnahmemechanismus für die Seitensicherung ist bereits vorinstalliert. Das spart viel Zeit beim Aufbau. Ohne Seitensicherung verbleiben die Aufnahmen unauffällig in unterster Position am Bett.



- ▲ Bei diagonaler Anstellung geben die Holme dem Pflegebedürftigen eine gute räumliche Orientierung.



Der kabellose Handschalter

▲ Der kabellose Handschalter lässt sich intuitiv bedienen.

Mehr Komfort und Bewegungsfreiheit sind die Stärken des kabellosen Handschalters. Im Bett und im Pflegezimmer ist er immer dort zur Stelle, wo er gebraucht wird. Die stabile Verbindung mit dem Dali per Bluetooth ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

Wie gewohnt wird der kabellose Handschalter an die Seitensicherung gehängt und ist dort jederzeit griffbereit. Der Pflegenden kann am Handschalter alle Verstelloptionen einzeln für den Bewohner sperren oder wieder entsperren. Dazu muss man den beigefügten Magneten auf das Bedienfeld legen und die Taste der zu sperrenden Funktion drücken.



Starke Vorteile

- leichte Bedienung im und außerhalb des Bettes, keine Einschränkung durch vorgegebene Kabellängen
- sehr leicht verständliche und kontrastreiche Piktogramme erleichtern die Bedienung
- Handschalter lässt sich frei an der Seitensicherung positionieren
- bei einer täglichen Bediendauer von 140 Sekunden reicht die Kapazität der Batterie 2 Jahre lang

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Handschalter mit Kabel

Maßgeschneiderte Betten für Ihre Anforderungen sind unser Ziel. Daher bieten wir für das Dali auch einen kabelgebundenen Handschalter als Option an. Die selektive Sperrung der Funktionen erfolgt hier mithilfe eines Schlüssels.

Beim Dali low-entry und beim Dali 100 ist der kabelgebundene Handschalter Standard, das Dali wash ist hingegen nur mit dem hygienischen kabellosen Handschalter lieferbar.



Ein fälliger Batteriewechsel wird rechtzeitig per Lichtsignal angezeigt.



▼ Die handelsübliche Batterie lässt sich in wenigen Sekunden auswechseln.



▲ Die Verstellfunktionen des Bettes können mithilfe eines Magneten einzeln gesperrt und entsperrt werden.

Der Handschalter lässt sich an die Seitensicherung hängen und ist jederzeit griffbereit.





◀ Der Spannungswandler SwitchMode stellt direkt an der Steckdose eine Schutzkleinspannung von 24 Volt her.

Jährlicher Stromverbrauch nur 4,5 kWh*



*Bei einer Belastung von 100 kg sowie 3 Höhenverstellungen der Liegefläche und 5 Anstellungen der Rückenlehne auf 45° pro Tag.

24-Volt-Antriebssystem


Das 24-Volt-Antriebssystem von Burmeier bietet einen optimalen Sicherheitsstandard für die häusliche Pflege. Alle spannungsführenden 230-Volt-Komponenten sind außerhalb des Bettes untergebracht. Direkt hinter dem Netzstecker befindet sich ein Gehäuse mit dem elektronischen Spannungswandler **SwitchMode**. Dadurch genießen die Bewohner ein Höchstmaß an Sicherheit.

Solange der Handschalter nicht betätigt wird, ist das Bett stromlos. Der Energieverbrauch sinkt dadurch deutlich. Noch mehr Kosten und Aufwand spart das Entfallen der Ableitstrommessungen, zertifiziert durch den **TÜV Rheinland**. Grundsätzlich ist bei Pflegebetten im gewerblichen Einsatz die geforderte Ableitstrommessung alle 2 Jahre durchzuführen. Mit dem 24-Volt-System verlängert sich dieses Intervall so stark, dass über die erwartbare Nutzungsdauer des Pflegebettes hinaus keine weitere Messung notwendig wird. Über die Länge der jeweiligen Nutzungsdauer informiert die Gebrauchsanweisung.

Selbst bei der ersten Inbetriebnahme ist keine Ableitstrommessung erforderlich, denn sie wurde bereits im Werk durchgeführt. Bei der Inbetriebnahme des Bettes muss somit **keine elektrisch unterwiesene Person** beteiligt sein – das spart dem Betreiber weitere Kosten.

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Starke Vorteile

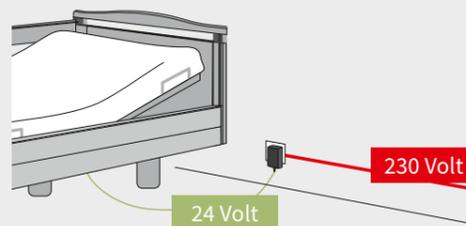

- Schutzkleinspannung ab Trafo an der Steckdose
- keine 230-Volt-Komponenten am Bett
- keine Ableitstrommessung nach Aufbau und über die zu erwartende Nutzungsdauer des Bettes hinaus
- für jedes Bett steht ein Prüfzertifikat zum Download zur Verfügung



Softcover



In einem schönen Bett, das zur Wohnungseinrichtung passt, fühlt man sich sofort viel wohler. Mit unseren Softcovern verwandelt sich die Dali-Serie in elegante Designerbetten. Softcover sind **Stoffhüllen**, die sich einfach an den Kopf- und Fußteilen und auch an der Seitensicherung anbringen lassen. Zur Auswahl stehen **6 attraktive Farben**: Petrol, Dunkelblau, Vanilla, Lavendel, Bordeaux und Braun.

Die Softcover bestehen aus hochwertigen Stoffen und können zuhause in der **Waschmaschine leicht gereinigt** werden. Sie sind umweltfreundlich nach dem Öko-Tex-Standard 100 gefertigt.





Erhältlich für
Liegeflächenmaße:

Sky-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Basic-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm
90 x 220 cm

Matratzen

Komfort bei Tag und Nacht

Verbringen Bewohner viel Zeit im Bett, bieten Original-Burmeier-Matratzen eine ideale Kombination aus Komfort und Prävention. Sie sind genau auf die Aufteilung der Liegefläche abgestimmt und machen jede Bewegung mit. Bei Verstellung der Rücken- und Oberschenkellehnen sorgen sie für ideale Druckentlastung. Bei den Modellen Sky-fit und Comfort-fit unterstützen Einschnitte an der Unterseite diese Flexibilität. Zudem erleichtern diese Matratzen mit ihrer Randzonenverstärkung das Sitzen auf der Bettseite.



▲ Modell Sky-fit mit hochwertiger Skytherm®-Auflage.

Sky-fit – das Premium-Modell

- hochwertige 2-Schicht-Matratze mit 2 cm Sky-therm®-Auflage und 12 cm Kaltschaum-Basis
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- Randzonenverstärkung für bequemes Sitzen auf der Bettseite
- abnehmbarer Wendebezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), 2,5 kPa (Auflage), Raumgewicht 50 kg/m³ (Basis), 40 kg/m³ (Auflage)



▲ Modell Comfort-fit mit Randzonenverstärkung.

Comfort-fit – die Mittelklasse

- die komfortable Matratze mit einem Kern aus elastischem Polyurethan-Kaltschaum (14 cm)
- Einschnitte in der Basis sorgen für optimale Anpassung an die Liegefläche
- Randzonenverstärkung schützt vor Herausrollen
- abnehmbarer Wendebezug, eine Seite Polyurethan (PU), andere Seite Polyester und Viskose, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 5,0 kPa (Randzonen), 4,0 kPa (Basis), Raumgewicht 40 kg/m³



▲ Modell Basic-fit.

Basic-fit – das Einsteigermodell

- Einschichtmatratze aus angenehmem Polyurethan (12 cm)
- weißer abnehmbarer PU-Bezug, Reinigung in handelsüblicher Waschmaschine
- Stauchhärte 4,5 kPa, Raumgewicht 40 kg/m³



Für noch mehr
wohnlichen
Komfort

◀ Die Häupter des Dali und des Dali low-entry lassen sich mit **Holzhauben** verkleiden. Diese hochwertigen Designelemente verbergen die Antriebstechnik des Bettes und sorgen für eine noch wohnlichere und privatere Optik.

▼ Die **Leselampe** sorgt für angenehmes Licht.



Praktisches Zubehör

Alle Betten der Dali-Serie bieten bereits in der Grundausstattung viel Komfort. Doch mit Original-Zubehör von Burmeier lassen sich Behaglichkeit, Schutz, Mobilisierung und Optik noch einmal erheblich steigern. Die Nutzer der Betten genießen mit Serviertablett und Leselampe einen **angenehmeren Alltag**. Durch einfache Montage und direkten Versand wird das Zubehör zum selbstverständlichen Begleiter.

Freunde und Kenner der Dali-Serie werden nach der Modellvariante **Arminia** fragen, die sich durch wohnliche Holzhauben über den Häuptern auszeichnete. Diese Holzhauben sind als Zubehör weiterhin erhältlich.



▲ Die **Bettverlängerung** bietet großen Menschen den benötigten Platz. Sie lässt sich auch nachträglich montieren. In Verbindung mit der Bettverlängerung sind entsprechende Seitensicherungen in 220 cm erhältlich.



▲ Dezent und flexibel: die ausziehbare **Erhöhung der Seitensicherung**.



▲ **Nachttische** von Burmeier bieten viel Stauraum und praktische Flächen für Utensilien und Getränke. Hier im Bild das Modell Cherusker mit höhenverstellbarem und schwenkbarem Betttisch.

▼ Der **Bettisch Duo** eignet sich ideal als Abstellfläche und bequemes Lesepult.




▲ Mit seinem großen Verstellbereich passt sich der **Server Pleto** allen Anforderungen mühelos an



◀ Die **Aufstehhilfe** unterstützt den Bewohner dabei, das Bett selbstständig und mühelos zu verlassen.



▲ Die Holme der Seitensicherung lassen sich mit der **Tragetasche** noch leichter transportieren und lagern.

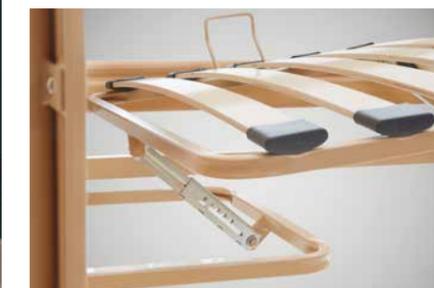

▲ Mithilfe des optionalen **Rastomaten** lässt sich die Unterschenkellehne manuell anstellen.



▲ Das **Serviertablett** wird einfach auf die angestellten Holme der Seitensicherung gelegt.



▲ **Wandabweisrollen** schützen das Bett und die Wände vor Beschädigungen.



▲ Das **Füllpolster** lässt sich auf die durchgehende Seitensicherung stecken und erleichtert das Sitzen auf der Bettseite.



▲ Weiche **Schaumlederbezüge** schützen den Bewohner bei Kontakten mit den Seitensicherungen und beim Verlassen des Bettes.



▲ Die **adaptierbare Seitensicherung** für das Dali bietet viel Schutz und lässt genügend Platz für den Ein- und Ausstieg.



Die Dali-Serie -
für erholsamen
Schlaf und neue
Lebensqualität

Ausstattungen und Optionen

Modellvariante	Dali	Dali 100	Dali wash	Dali low-entry
Liegefläche	90 × 200 cm, 4-geteilt	100 × 200 cm, 4-geteilt	90 × 200 cm, 4-geteilt	90 × 200 cm, 4-geteilt
Außenmaße	102 × 218 cm	112 × 218 cm	102 × 218 cm	102 × 225 cm
Höhenverstellung	40 – 80 cm	40 – 80 cm	40 – 80 cm	23 – 63 cm
Sichere Arbeitslast	185 kg	185 kg	185 kg	175 kg
Fußtieflage	12°	12°	12°	12°
Holzdekor	Buche Natur	Buche Natur	Buche Natur	Buche Natur
Gestellfarbe	Topas	Topas	Topas	Topas
Kabelloser Handschalter mit selektiver Sperrfunktion	✓	-	✓	-
Kabelgebundener Handschalter mit selektiver Sperrfunktion	0	✓	-	✓
Maschinelle Aufbereitung	-	-	✓	-
Federholzleisten-Liegefläche	✓	✓	-	✓
Metall-Liegefläche	0	-	✓	-
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓	✓	✓	✓
Holzhauben für Häupter	0	-	-	0
Aufrichter	✓	✓	✓	✓
Durchgehende Seitensicherungen aus Holz	✓	✓	✓	✓
Ausziehbare Seitensicherungerhöhung	0	0	0	0
Adaptierbare Seitensicherungen	0	0	-	-
Schaumlederbezug	0	0	0	0
Mechanische Notabsenkung der Rückenlehne	✓	✓	✓	✓
Wandabweisrollen	0	0	0	0
Bettverlängerung 20 cm	0	0	-	-
Leselampe	0	0	0	0
Serviertablett	0	-	0	0
Aufstehhilfe	0	0	-	0
Softcover für Häupter	0	-	0	-
Softcover für Seitensicherungen	0	0	0	0
Manuelle Verstellung der Unterschenkellehne (Rastomat)	0	0	✓	✓
Füllpolster	0	0	0	0
Tragetasche für Holme der Seitensicherung	0	0	0	0

✓ = Standardausstattung
0 = optional erhältlich
- = nicht lieferbar

Pflege-Hilfsmittel-Nummern:
 Dali und Dali wash: 50.45.01.1080
 Dali 100: 50.45.01.1089
 Dali low-entry: 50.45.01.5003

Hilfsmittel-Nummern:
 Dali und Dali wash: 19.40.01.3041
 Dali 100: 19.40.01.3050
 Dali low-entry: 19.40.01.5001

◀ Das Niedrigbett Dali low-entry sorgt für einen erholsamen Schlaf und senkt das Risiko von Sturzverletzungen ohne freiheitsentziehende Maßnahmen.



STIEGELMEYERGROUP



125 JAHRE


**ERFAHREN
MENSCHLICH
LÖSUNG-
ORIENTIERT**

STIEGELMEYER
GROUP

Solutions for people who care

Der Weg zum Pflegebett

So geht's!

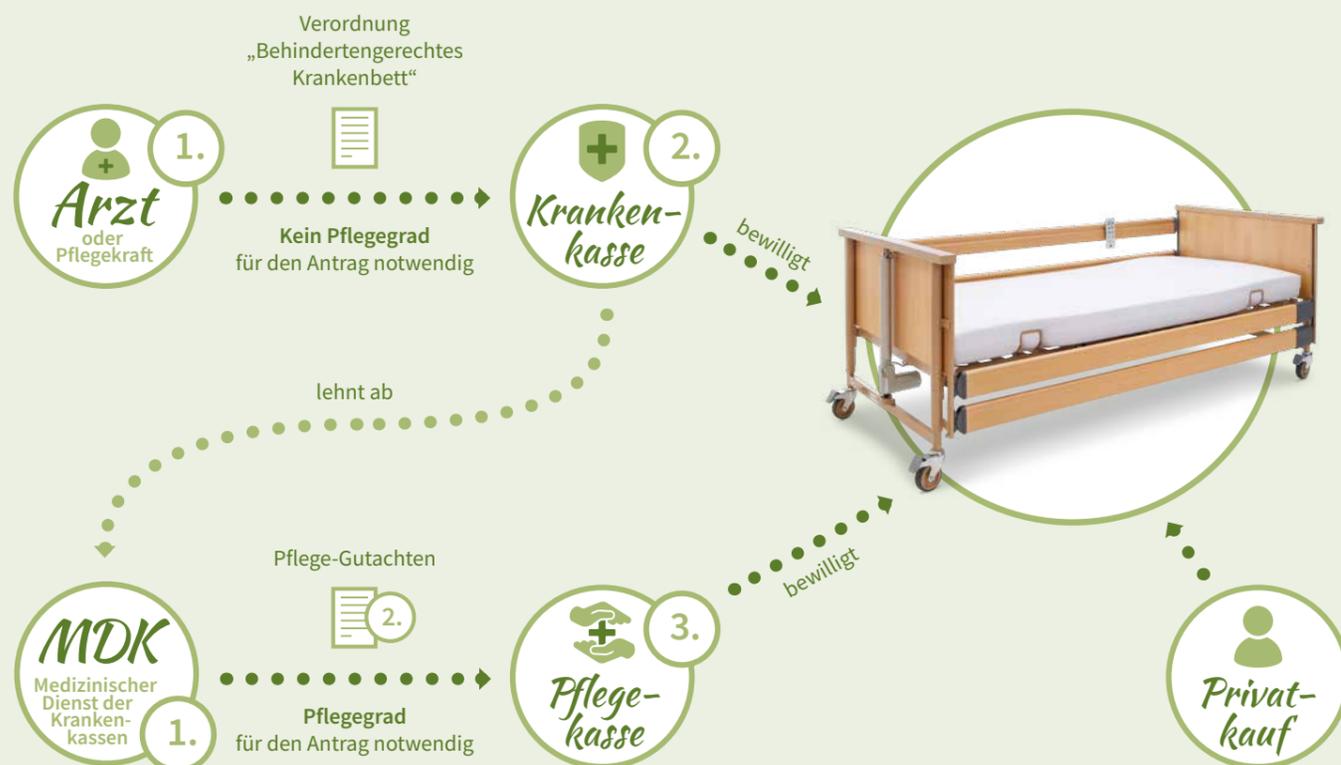

Die Stieglmeyer-Gruppe ist Deutschlands führender Hersteller von medizinischen Betten für Krankenhäuser, Pflegeheime und die Pflege zuhause. Mit modernen Nachttischen, Möbeln und digitalen Assistenzsystemen ist sie zugleich ein innovativer Anbieter ganzheitlicher Lösungen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt erfolgreich Angebote für die internationalen Märkte in mehr als 100 Ländern.

Unsere Stärken:

- Produktentwicklung an unserem Hauptsitz Herford in Deutschland – Produktion in vier modernen Werken in Deutschland und Polen
- Fabrik in China für den chinesischen Markt
- Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in zahlreichen Ländern
- erstklassiger Service mit zuverlässiger Ersatzteilversorgung
- Schulungen und Prozessoptimierung für unsere Kunden
- nachhaltiges Handeln mit hohem gesellschaftlichem Engagement

1 000 MITARBEITER WELTWEIT

11 STANDORTE in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Finnland, Südafrika und China

Maßgeschneiderte ANGBOTE für alle MÄRKTE

MEHR ALS **100 000** produzierte Betten pro Jahr

Internationale ZERTIFIZIERUNG

BIS ZU **15** JAHRE Ersatzteillieferungen

VERTRIEB in über **100** Ländern

DEUTSCHE INGENIEURSKUNST

Unsere Expertise

- Krankenhaus
- Pflegeheim
- Pflege zuhause
- Komfortbetten
- Objektmöbel
- Service

Unsere Werte

- Erfahren
- Menschlich
- Verlässlich
- Lösungsorientiert
- Aufgeschlossen
- Selbstbewusst

Unsere Marken





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com



Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com